

Preanalytická fáze u vybraných metod úseku hematologie OLM Prostějov

Název metody kód metody	Odběrový materiál/počet	Zpracování	Poznámka
Agregace ASA *97	Stabilizovaný citrát/1x	Nestáčet Doručit do 4 hod. od odběru	Uvést antiagregační léčbu na žádance
Agregace thienopyridiny 1140	Stabilizovaný citrát/1x	Nestáčet Doručit do 4 hod. od odběru	Uvést antiagregační léčbu na žádance
Agregace-krvácení *93	Stabilizovaný citrát/3x 3,8 ml nebo 1x10 ml	Nestáčet Doručit do 4 hod. od odběru	Uvést antiagregační léčbu na žádance
Agregace spontánní 1145	Stabilizovaný citrát/1x	Nestáčet Doručit do 4 hod. od odběru	Uvést antiagregační léčbu na žádance
Antitrombin 1106	Citrát/1x	Nestáčet Doručit do 6 hod. od odběru	Uvést antikoagulační léčbu na žádance
APTT 1102	Citrát /1x	Nestáčet Doručit do 6 hod. od odběru	Uvést antikoagulační léčbu na žádance
D-dimery 1110	Citrát /1x	Nestáčet Doručit do 6 hod. od odběru	Uvést antikoagulační léčbu na žádance
Koagulační faktory: II,V,VII,VIII, IX,XI,XII 1124,1125,1126,1128, 1129,1130,1131	Citrát /1x	Nestočené doručit do 2 hod. od odběru Stočená plazma - doručit do 4 hodin od separace nebo zamrazit na -20 °C	Uvést antikoagulační léčbu na žádance
Fibrinogen 1104	Citrát /1x	Nestáčet Doručit do 6 hod. od odběru	Uvést antikoagulační léčbu na žádance
Heparin-Xa 1107	Citrát /1x	Nestočené doručit do 2 hod. od odběru Stočená plazma – zamrazit na - 20°C	Uvést preparát, dávku a čas aplikace na žádance
Krevní obraz bez diff *100	EDTA/1x	Doručit do 8 hodin od odběru, pokud skladováno při 2-5°C doručit do 24 hod	
Krevní obraz s diff *101	EDTA/1x	Doručit do 8 hodin od odběru	
Leu-dif manuálně *102	EDTA/1x	Doručit do 8 hodin od odběru	
Lupus antikoagulant 1115	Citrát /1x	Nestočené doručit do 2 hod. od odběru Stočená plazma - doručit do 4 hodin od separace nebo zamrazit na -20 °C	Uvést antikoagulační léčbu na žádance
Protein C, Protein S free Plasminogen 1113,114,1132	Citrát /1x	Nestočené doručit do 2 hod. od odběru Stočená plazma - doručit do 4 hodin od separace nebo zamrazit na -20 °C	Uvést antikoagulační léčbu na žádance
Pro C Global 1111	Citrát /1x	Nestočené doručit do 2 hod. od odběru Stočená plazma - doručit do 4 hodin od separace nebo zamrazit na -20 °C	Uvést antikoagulační léčbu na žádance
PT-INR 1100	Citrát /1x	Nestáčet Doručit do 6 hod. od odběru	Uvést antikoagulační léčbu na žádance

Preanalytická fáze u vybraných metod úseku hematologie OLM Prostějov

Název metody kód metody	Odběrový materiál/počet	Zpracování	Poznámka
Retikulocyty 1025	EDTA/1x	Doručit do 8 hodin od odběru	
TDI-Pradaxa 1188	Citrát /1x	Nestáčet Doručit do 8 hod. od odběru	Uvést dávku a čas aplikace na žádance
Soubor Trombofilie *8	EDTA/2x Citrát /3x	Nestočené doručit do 2 hod. od odběru Citrátová plazma stočená - doručit do 4 hodin od separace nebo zamrazit na -20 °C	Uvést antikoagulační léčbu na žádance
Trombo manuálně 1037	EDTA/1x	Doručit do 8 hodin od odběru	
Trombinový test 1105	Citrát 1x	Nestáčet Doručit do 6 hod. od odběru	Uvést antikoagulační léčbu na žádance

V případě nedodržení výše uvedeného postupu zpracování bude lékař vydán výsledek s následujícím komentářem:

„Výsledky vyšetření mohou být zkresleny, protože nebyl dodržen doporučený čas pro doručení vzorků do laboratoře. Indikující lékař přebírá odpovědnost za finální interpretaci“

Mgr. Jarmila Šianská

analytik úseku hematologie OLM Prostějov

MUDr. Štefan Repovský

primář hematologických a transfuzních úseků OLM

prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem

přednosta OLM